



**FRESENIUS  
KABI**

с заботой о жизни



# AmiCORE

Предназначена для донора и оператора


Система AmiCORE помогает упростить  
каждый этап процесса сбора тромбоцитов

Простота в эксплуатации, интуитивный  
пользовательский интерфейс

Расширенные функции управления  
донорами

Автоматическое добавление добавочного раствора для  
хранения тромбоцитов (разъем PAS)

# ПРОСТАЯ И ЛЕГКАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМА

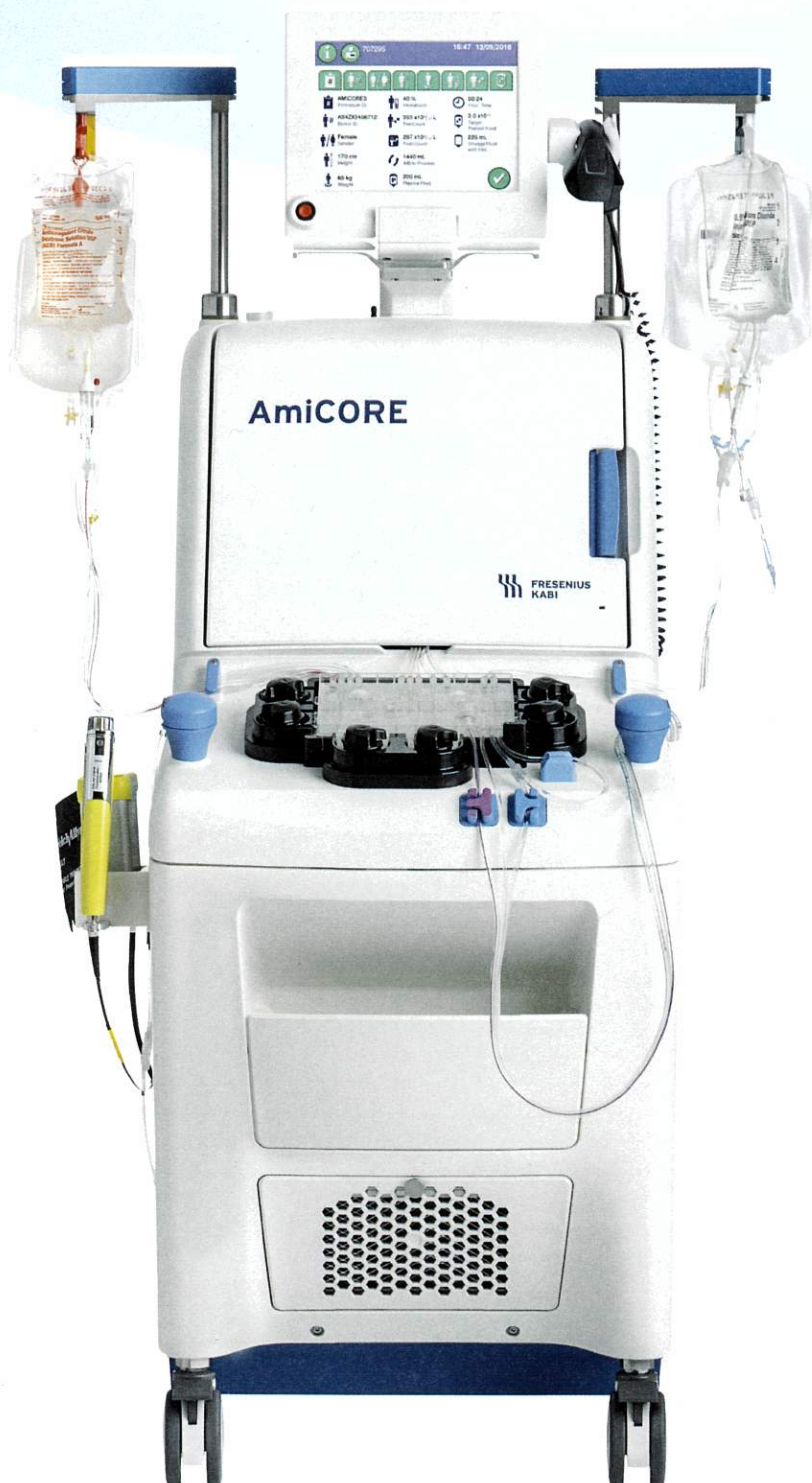

Система AmiCORE помогает упростить каждый этап процесса сбора тромбоцитов, позволяя операторам уделять донорам больше времени.

- SmartRoute упрощает установку комплекта с держателем лотка, одной кассетой, направляющими для трубок и трубками с цветовой кодировкой
- Центрифуга расположена на оптимальной высоте для упрощения установки комплекта
- Интуитивный пользовательский интерфейс обеспечивает легкую навигацию с большими и удобными сенсорными экранами
- Весы обеспечивают точное измерение объема жидкости
- Загрузка данных процедуры через USB осуществляется ежедневно, еженедельно или ежемесячно
- Не требует использования инструментов, обеспечивая оперативное и простое техническое обслуживание



# Благодаря продуманному дизайну и исключительной производительности интеллектуальный мониторинг AmiCORE позволяет обновлять ваши технологии.

- Автоматическое добавление добавочного раствора для хранения тромбоцитов упрощает общие процедуры, связанные с тромбоцитами.
- Процесс лейкоредукции автоматически обеспечивает снижение тромбоцитов без дополнительной стадии фильтрации
- Точность после подсчета тромбоцитов позволяет выбирать целевые показатели для обеспечения безопасности доноров.
- Электронные записи процедур упрощают внедрение документации, требуемой надлежащей производственной практикой

## AmiCORE предоставляет широкий набор функций управления донорами для операторов.

- Солевой раствор заменяет жидкость во время донорства
- Интеллектуальное управление потоком (IFC) автоматически устанавливает оптимальную скорость потока для доноров
- Цифровой контроль скорости потока и мониторинг давления в режиме реального времени помогают защитить вены донора и сохранить комфорт
- Встроенная манжета для измерения давления позволяет донорам напрягаться во время взятия и расслабляться во время возврата.
- Световые индикаторы у донора информируют доноров о том, когда нужно сдавливать и когда отпускать, и указывают на ход процедуры.
- Таймер дезинфекции позволяет операторам устанавливать время дезинфекции для последовательной очистки места венопункции и минимизации риска бактериального заражения<sup>2</sup>




1. Раствор InterSol используется в качестве раствора для хранения концентраций тромбоцитов. Он не предназначен для прямого внутривенного вливания. Раствор InterSol не оказывает фармакологического действия.

2. С.П. Макдональд и др. Относительные значения вмешательств и улучшенной дезинфекции рук доноров для снижения риска бактериального заражения при переливании крови. *Vox Sanguinis* (2004) 86, 178-182

# AmiCORE Система афереза

Расширенные функции управления донорами в системе AmiCORE предоставляют центрам крови возможность настраивать процедуру сбора тромбоцитов для широкого круга доноров.

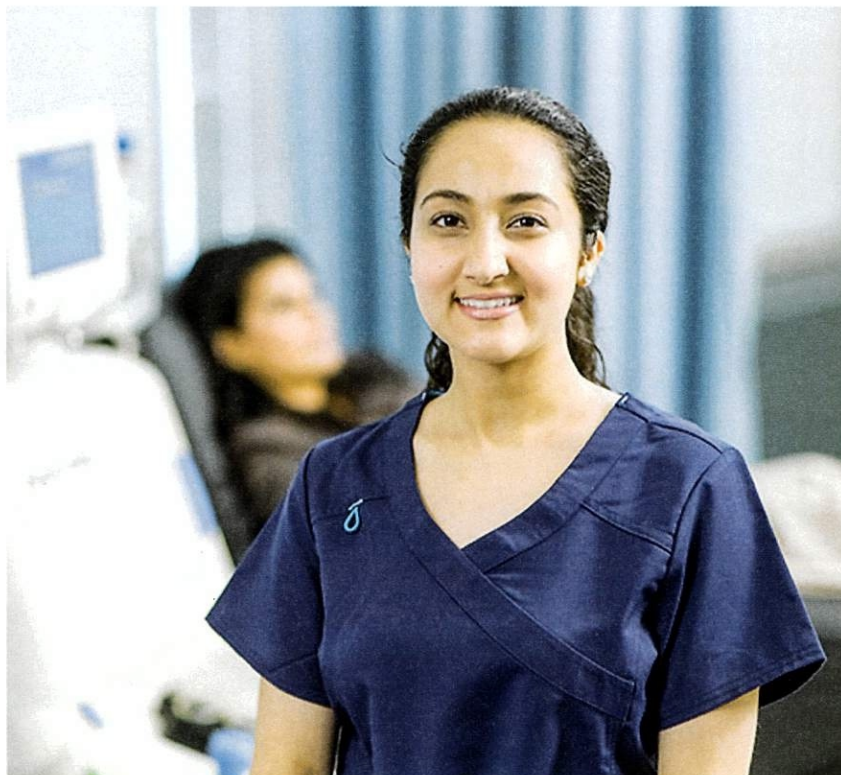

## Информация для заказа

6R8800	Система афереза AmiCORE
X (or P, R) 6R8884	Набор для афереза AmiCORE, Одна игла с двумя контейнерами для тромбоцитов и разъемом PAS
X (or P, R) 6R8880	Набор для афереза AmiCORE, Одна игла
X (or P, R) 6R8882	Набор для афереза AmiCORE, Одна игла с двумя контейнерами для тромбоцитов
6212836539	USB-накопитель AmiCORE
6112837995S	Держатель для уплотнения трубки (Mobilea II) в сборе
6112836969S	Держатель сканера штрих-кода
6112838012S	Держатель сканера штрих-кода - режим презентации
6112837998S	Держатель манжеты для измерения давления

Полный список предупреждений и предостережений, связанных с использованием системы AmiCORE, см. в Руководстве по эксплуатации AmiCORE.